



Abductor de juanete

CÓDIGO DE PRODUCTO: A057 MATERIAL: NEOPRENE – AE57 MATERIAL: TELA ELÁSTICA



FINALIDAD

Corregir y posturar las desviaciones de la articulación metatarso falángica del dedo gordo del pie (hallux valgus o juanete).

USOS GENERALES

Artritis, pies valgus, pies planos, juanetes (hallux valgus).

INDICACIONES

Patologías traumatológicas y reumatológicas en donde existan desviaciones del eje normal de la articulación metatarso falángico del primer dedo del pie: artritis, artrosis, pies vagos, pies planos, entre otras. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica.
Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Dolor articular por hipercorrección o uso prolongado y excesivo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Incluye una varilla interna de contención.

Código A057: Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Código AE57: Algodón 65% - Goma 35%.

Ajustes en abrojo.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS (CÓDIGO A057)



Para conocer tu talla, debes conocer tu número de calzado.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE

NRO. DE CALZADO

0

34 / 35 / 36

1

37 / 38 / 39

2

40 / 41

3

42 / 43 / 44

INSTRUCCIONES DE USO



1. Posicionar la varilla en la parte lateral del hallux o en el primer dedo del pie.



2. Ajustar el abrojo superior.




3. Pasar la segunda tira por debajo de la planta del pie.



4. Cerrar en el empeine.



5. Deslizar la última regulación alrededor del tobillo y sujetarlo con el abrojo.

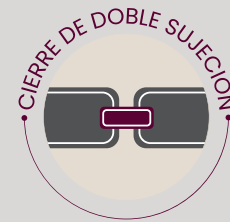


D.E.M.A. Respalda tus movimientos

 **D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

