



Braguero funcional

CODIGO DE PRODUCTO: BRA F

FINALIDAD

Contener y evitar específicamente la salida de las vísceras abdominales a través del anillo inguinal y crural.

USOS GENERALES

Indicado para pre-operatorios. Contiene al tejido y alivia molestias. Hernias inguinales o crurales, eventraciones no complicadas.

INDICACIONES

Patologías en las que exista presencia de protusiones viscerales a nivel inguinal y crural (hernias o eventraciones) de grados leves y no complicados. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Hernias complicadas que deban recibir tratamiento quirúrgico. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Compresión excesiva o insuficiente por talla inadecuado.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Cutil y velour.

Incluye uno o dos suplementos acolchados internos, manipulable según la necesidad de uso.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

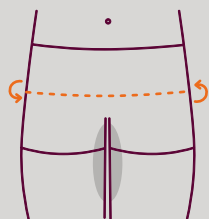

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de cadera. (A 8 cm de tu ombligo)


UNISEX

TALLE	CADERA
CH	72 cm hasta 98 cm
M	92 cm hasta 130 cm
G	112 cm hasta 160 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Separar los abrojos de los sujetadores ubicados en el pasa cinto.
2. Abrir uno de los lados de la cintura.
3. Ubicar el o los suplementos que precise, provistos de abrojo que se adhieren a la parte delantera de la prenda.
4. Colocar alrededor de la cadera, posicionando los accesorios en la región afectada.
5. Ubicar las tiras y cerrar la prenda en cada lateral del glúteo.
6. Pasar los sujetadores entre las piernas hacia atrás.
7. Deslizar las tiras por el pasador que posee el pasa cinto y regular la presión que necesite con el abrojo.

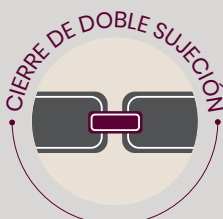

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat

