



## Codera tubo de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: C012

### FINALIDAD

Contener las estructuras anatómicas que forman parte de la articulación de codo.

### USOS GENERALES

Alivia tensiones y malestares. Brinda calor térmico, antiinflamatorio y analgésico. Recuperación de tendinitis, entesitis, tenosinovitis, traumatismos, esguinces, hiperlaxitud articular. Uso deportivo y actividades cotidianas.

### INDICACIONES

Inestabilidades articulares por hiperlaxitud, inflamación leve de las inserciones musculares de codo o distensiones ligamentarias. Tendinitis, tenosinovitis, entesopatías, epicondilitis (codo de tenista), epitrocleitis (codo de golfista). Si lo desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Lesiones dermatológicas en el área de cobertura de producto, alergia a alguno de los componentes.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



### PRECAUCIONES

Sudoración excesiva por uso prolongado que conlleva a lesiones de maceración de la piel.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.  
Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

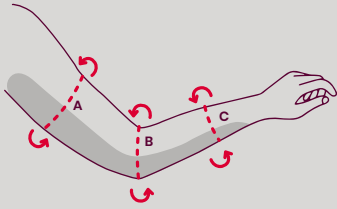

Para conocer tu talla, medí la circunferencia del bíceps, codo y antebrazo.

**UNISEX  
IZQUIERDO Y DERECHO**

TALLE	(A) BICEPS	(B) CODO	(C) ANTEBRAZO
1	22/26 cm	21/25 cm	20/24 cm
2	24/30 cm	22/26 cm	22/25 cm
3	26/34 cm	24/28 cm	24/28 cm
4	28/36 cm	26/30 cm	26/32 cm
5	32/38 cm	28/32 cm	28/34 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir el brazo en la prenda.
2. Posicionarla en el centro del codo.



MOVIMIENTOS LIBRES



TELA NEOPRENE EFECTO CALOR TERAPÉUTICO



FÁCIL COLOCACIÓN



EFEECTO ANTIINFLAMATORIO



APTO PARA USO DEPORTIVO

**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat  
Asociación Nacional de Medicamentos,  
Aparatos y Tecnología Médica

