



D.E.M.A.

IN MOTION

Codera de tenista de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: C014

FINALIDAD

Estabilizar, contener y limitar parcialmente las estructuras musculotendinosas que se insertan en la articulación de codo.

USOS GENERALES

Estabiliza y alivia tensiones. Brinda calor térmico, antiinflamatorio y analgésico. Recuperación de tendinitis, entesitis, tenosinovitis, traumatismos, esguinces, hiperlaxitud articular. Uso deportivo y actividades cotidianas.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas y reumatológicas que impliquen inflamación de ligamentos y tendones. Epicondilitis, epitrocleitis, tenosinovitis y entesitis. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Heridas o laceraciones en la zona a tratar. Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Edema y dolor por ajuste excesivo o mal uso.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros.
Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

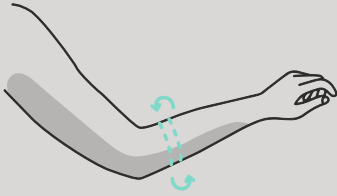

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de tu antebrazo.

**UNISEX
IZQUIERDO Y DERECHO**

TALLE

ANTEBRAZO

1	22 cm hasta 30 cm
2	24 cm hasta 33 cm
3	28 cm hasta 36 cm
4	30 cm hasta 40 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la mano en la prenda.



2. Deslizar hasta posicionarla en el antebrazo, sobre la zona lesionada.



3. Cerrar el lazo en abrojo para una justa compresión.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
IN MOTION



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Maquillistas,
Alimentos y Tecnología Médica

