

D.E.M.A.

IN MOTION

Codera regulable de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: C015

FINALIDAD

Contener, estabilizar y proteger las inserciones musculotendinosas de la articulación de codo generando una compresión regulable sobre las estructuras anatómicas mencionadas.

USOS GENERALES

Alivia tensiones y malestares. Brinda calor térmico, antiinflamatorio y analgésico. Recuperación de tendinitis, entesitis, tenosinovitis, traumatismos, esguinces, hiperlaxitud articular. Uso deportivo y actividades cotidianas.

INDICACIONES

Inflamaciones agudas como tendinitis que requieran ajuste progresivo y contención regulable. Traumatismos, esguinces e inestabilidades articulares como hiperlaxitud. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes de producto, lesiones de piel y partes blandas en la zona a tratar.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Edema y dolor por ajuste excesivo o mal uso.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

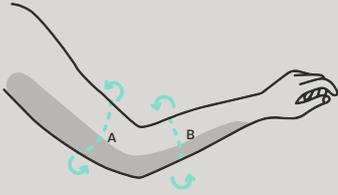

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de bíceps y antebrazo.

UNISEX
IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	BICEPS (A)	ANTEBRAZO (B)
Único	24 / 34 cm	24/ 34 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir la prenda.



2. Posicionar el codo en el centro.

3. Cerrar los abrojos en el bíceps y en el antebrazo.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
IN MOTION



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

