



Cabestrillo estándar

CODIGO DE PRODUCTO: C016

FINALIDAD

Contener, inmovilizar parcialmente y posturar las estructuras anatómicas de miembro superior, especialmente la articulación de hombro y de codo.

USOS GENERALES

Luxaciones, subluxaciones, traumatismos, tendinopatias, fracturas, postquirúrgicos, lesiones del plexo braquial, hemiplejias.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas que requieran limitar la movilidad de hombro y codo como luxaciones, subluxaciones, traumatismos, tendinopatias, fracturas, postquirúrgicos, como neurológicas: lesiones de plexo braquial, hemiplejias de distintas causas (traumatismos encéfalo craneanos, acv). Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Situaciones en las que se requiera recuperar la movilidad de rango articular de hombro y/o el codo, (capsulitis, hombro congelado, residuos flexores de codo).

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Limitación de rango articular de hombro o codo por uso prolongado y permanente. Hipotrofia y debilidad muscular por uso excesivo.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Algodón 100%
Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

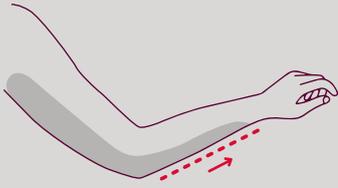

Para conocer tu talle, medí el largo del antebrazo desde el codo hasta la muñeca.

**UNISEX
IZQUIERDO Y DERECHO**

TALLE	ALTURA	ANTEBRAZO
P	1.30 mts	22 cm
CH	1.50 mts	28 cm
M	1.65 mts	35 cm
G	1.75 mts	37 cm
EG	1.90 mts	40 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Colocar el brazo lesionado dentro de la prenda a 90°.



2. Pasar la tira superior por encima de los hombros y deslizarla por el pasador del cabestrillo. Ajustar la altura.



3. Posicionar la almohadilla correctamente para evitar molestias.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

 **D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

