



Cabestrillo Reversible

CÓDIGO DE PRODUCTO: C026

FINALIDAD

Contener, inmovilizar parcialmente y posturar las estructuras anatómicas del miembro superior, especialmente la articulación de hombro y de codo.

USOS GENERALES

Luxaciones, subluxaciones, traumatismos, tendinopatías, fracturas, post quirúrgicos, lesiones del plexo braquial, hemiplejías. Sostén e inmovilizador.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas que requieran limitar la movilidad de hombro y codo como luxaciones, subluxaciones, traumatismos, tendinopatías, fracturas, postquirúrgicos. Patologías neurológicas como lesiones de plexo braquial, hemiplejías de distintas causas (acv, traumatismos encéfalo craneanos). Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Situaciones en las que se requiera recuperar la movilidad de rango articular del hombro y/o el codo, (capsulitis, hombro congelado, residuos flexores de codo).

PRECAUCIONES

Limitación de rango articular de hombro o codo por uso prolongado y permanente. Hipotrofia y debilidad muscular por uso excesivo.



CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Algodón 100% e interior acolchado.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

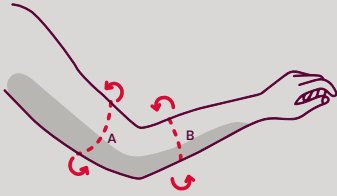

Para conocer tu talla, medí el largo del antebrazo desde el codo hasta la muñeca.

UNISEX
IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	T. REMERA	ALTURA	ANTEBRAZO
Pediátrico	T.6	1.30 mts	22 cm
Juvenil	T.14	1.50 mts	28 cm
Adulto	T.L	1.85 mts	35 cm
Especial	T.XL	1.90 mts	37 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar el brazo lesionado en forma de L dentro de la prenda.



2. Pasar la tira superior por encima de los hombros y deslizarla por el pasador del cabestrillo.



3. Deslizar la sujeción inferior por detrás de la cintura.




4. Cerrar el producto con la hebilla.



5. Ajustar el regulador para restringir los movimientos y la altura.



6. Posicionar la almohadilla correctamente en la cervical para evitar molestias.

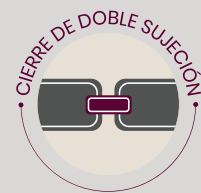

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Maestrías
Alimentarias y Tecnología Médica

