



# Cabestrillo inmovilizador

CODIGO DE PRODUCTO: C027

## FINALIDAD

Contener, inmovilizar y posturar en todos los planos a la articulación de hombro. Especialmente alineando el húmero, evitando la flexión, abducción, rotaciones internas y externas de hombro.

## USOS GENERALES

Luxaciones, subluxaciones, traumatismos, tendinopatías, fracturas, postquirúrgicos, tendinitis, tenosinovitis, entesitis moderada o severa.

## INDICACIONES

Patologías traumatológicas como fracturas de humero sin indicación quirúrgica, luxaciones y subluxaciones de hombro, fracturas de codo que requieran tratamiento conservador, tendinitis, tenosinovitis, entesitis moderadas o severas, fracturas de antebrazo sin indicación quirúrgica. Si lo desea, consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica. Situaciones en las que se precisen recuperar la movilidad de rango articular de hombro y/o el codo, (capsulitis, hombro congelado, residuos flexos de codo).

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



## PRECAUCIONES

Limitación de rango articular de hombro o codo por uso prolongado y permanente. Hipotrofia y debilidad muscular por uso excesivo.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Velour con interior acolchado.  
Contiene 1 unidad.



## CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

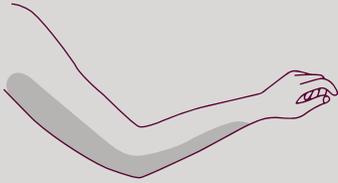

UNISEX  
IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE

Único

PESO

hasta 100 KG

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja a la altura del tórax.
2. Posicionar el brazaletes debajo del brazo lesionado y el tirador en la espalda.
3. Cerrar el abrojo y ajustar el brazaletes.
4. Pasar el tirador desde la espalda, sobre el hombro sano.
5. Colocar la muñequera en el brazo lesionado y adherirse a la faja.
6. Ajustar la altura con la hebilla.



***D.E.M.A. Respalda tus movimientos***

 **D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

  
Asociación Nacional de Maqueros  
Aparatos y Tecnología Médica

