



D.E.M.A.

Chaleco corrector postural en neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: C029

FINALIDAD

Ayuda a posturar y corregir las desalineaciones del raquis dorsal, mejorar la postura de hombros y cintura escapular.

USOS GENERALES

Cifosis dorsal e hiperlordosis lumbar, ante pulsión excesiva de hombros. Sostén y corrector postural. Alivia contracturas y tensiones musculares. Se recomienda la utilización por encima de una prenda de algodón en períodos fraccionados.

INDICACIONES

Patologías que presenten cifosis dorsal (jorobas, dorsos curvos), antepulsión excesiva de hombros, u otras que generan malestar cervico dorsal e impiden una adecuada expansión torácica.

CONTRAINDICACIONES

Cifosis dorsales irreductibles o no corregibles o que requieran tratamiento quirúrgico.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Laceración de la región axilar por rozamiento excesivo o mal uso.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

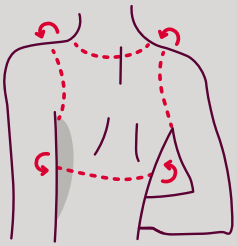

Para conocer tu talle, debes conocer tu talle de remera, peso y altura.

UNISEX

TALLE	TALLE DE REMERA	PESO	ALTURA
1	XS	50 kg	1.50 mts
2	M / L	80 kg	1.80 mts
3	XL / XXL	100 kg	2.00 mts

INSTRUCCIONES DE USO




1. Pasar los brazos por los orificios.



2. Regular los abrojos laterales.



3. Centrar el chaleco en la espalda.

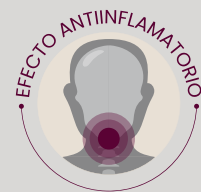

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

