



## Cabestrillo con cruce

CODIGO DE PRODUCTO: C083 - C019

### FINALIDAD

Contener, inmovilizar parcialmente y posturar las estructuras anatómicas de miembro superior incluyendo articulaciones, plexo braquial, además segmentos corporales como brazo y antebrazo.

### USOS GENERALES

Luxaciones, subluxaciones, traumatismos, tendinopatias, fracturas, post quirúrgicos, lesiones del plexo braquial, hemiplejías.

### INDICACIONES

Patologías traumatológicas que requieran limitar la movilidad de hombro y codo. Especialmente indicado en patologías neurológicas como lesiones de plexo braquial debido a la protección de la región supraclavicular por su cruce posterior contralateral, hemiplejías de distintas causas (acv, traumatismos encéfalo craneanos). Si lo desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Situaciones en las que se requiera recuperar la movilidad de rango articular de hombro y/o el codo, (capsulitis, hombro congelado, residuos flexores de codo). Patologías que precisen resolución quirúrgica. Sostén e inmovilizador.



### PRECAUCIONES

Limitación de rango articular de hombro o codo por uso prolongado y permanente. Hipotrofia y debilidad muscular por uso excesivo.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Algodón 100%.  
Contiene 1 unidad.




### CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

## MEDIDAS

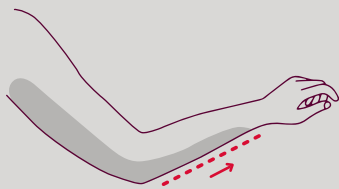

Para conocer tu talle, medí el largo de antebrazo y peso.

**UNISEX  
IZQUIERDO Y DERECHO**

TALLE	TALLE REMERA	ALTURA	ANTEBRAZO
P	TALLE 6	1.30 mts	22 cm
CH	TALLE 10	1.50 mts	28 cm
M	TALLE 16	1.65 mts	35 cm
G	TALLE L	1.75 mts	37 cm
EG	TALLE XL	1.90 mts	40 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



**1.** Ubicar el brazo lesionado a 90° dentro de la prenda.



**2.** Pasar la tira superior por encima de los hombros y deslizarla por el pasador del cabestrillo. Ajustar la altura.



**3.** Tomar la sujeción inferior por detrás de la cintura y cerrarla en el producto con el abrojo.




**4.** Ajustar el regulador para restringir los movimientos.



**5.** Posicionar la almohadilla correctamente para evitar molestias.

Nota: para acomodar el cabestrillo en el brazo contrario, dar vuelta totalmente la prenda, exponiendo su lado interno y repetir el proceso de colocación.

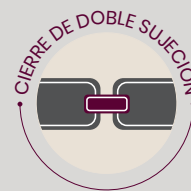

**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat  
Asociación Nacional de Medicamentos,  
Alimentos y Tecnología Médica

