



D.E.M.A.

Cincha rotuliana de neoprene doble

CÓDIGO DE PRODUCTO: CR-D

FINALIDAD

Contener y limitar parcialmente la movilidad de la rótula y del tendón.

USOS GENERALES

Luxaciones o subluxaciones rotulianas. Contención de tendones y ligamentos. Para uso deportivo o actividades cotidianas.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas con propensión a la subluxación o luxación rotuliana por alteraciones anatómicas y desbalances musculares. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Luxación rotuliana con indicación quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Compresión excesiva o insuficiente por talla inadecuado.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Incluye un fleje interno.

Cierre en abrojo regulable.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

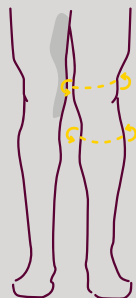

Para conocer tu talla, medí la circunferencia bajo y sobre rodilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	BAJO RODILLA	SOBRE RODILLA
1	hasta 32 cm	hasta 36 cm
2	hasta 34 cm	hasta 46 cm
3	hasta 36 cm	hasta 50 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir la prenda.



2. Posicionar la zona acolchada en la rótula.



3. Ajustar utilizando el pasador plástico que regula y tracciona cerrando con el abrojo. Repetir el proceso sobre la rodilla.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:



+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

