



D.E.M.A.

Corset lumbar

CODIGO DE PRODUCTO: CSL28 – CSL33 – CDL

FINALIDAD

Limitar parcialmente los movimientos de flexión, extensión y lateralización de la región lumbosacra, contribuye a mejorar la postura.

USOS GENERALES

Patologías reumatológicas de la región lumbosacra, post operatorios, cirugías, malestares posturales o de cintura, fracturas, contusiones, contracturas, desgarros, esguinces, dolores crónicos y lesiones musculares. Corrector postural. Se recomienda su uso por encima de una prenda de algodón.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas, lumbalgias, traumatismos, lesiones por movimientos repetitivos de la zona lumbosacra, hernias discales, antero , retrolistesis de grado leve o moderado, contracturas, distensiones musculares y ligamentarias de la zona lumbosacra. Si lo desea, consulte a su médico.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o que precisen mayor contención de la zona afectada. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Cutil 100% algodón.

Incluye siete varillas de contención maleables según la necesidad de uso.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

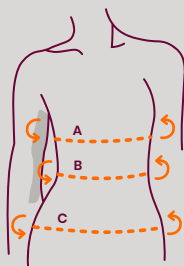

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de bajo busto, cintura y cadera

UNISEX

Altura 28 / 33 / 36 cm

TALLE	(A) BUSTO	(B) CINTURA	(C) CADERA
1	68/75 cm	65/80 cm	76/90 cm
2	74/87 cm	78/90 cm	90/98 cm
3	86/94 cm	89/96 cm	93/105 cm
4	94/105 cm	97/106 cm	106/115 cm
5	104/116 cm	106/125 cm	116/128 cm

INSTRUCCIONES DE USO




1. Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.



2. Posicionar las varillas centradas en la espalda.



3. Cerrar los abrojos en el medio del abdomen.

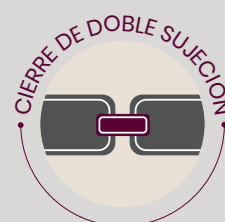

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contamos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

