



Espaldera acolchada

CÓDIGO DE PRODUCTO: E026-U

FINALIDAD

Posturar y ayudar a corregir las desalineaciones del raquis dorsal, mejorar la postura de hombros y la cintura escapular.

USOS GENERALES

Cifosis dorsal, antepulsión excesiva de hombros. Sostén corrector postural en actividades habituales. Alivia contracturas y tensiones musculares. Se recomienda la utilización por encima de una prenda de algodón en periodos fraccionados.

INDICACIONES

Patologías que presenten cifosis dorsal (jorobas, dorsos curvos), antepulsión excesiva de hombros, o aquellas que generan dolor cervico dorsal e impiden una adecuada expansión torácica. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Cifosis dorsales irreductibles, no corregibles o que requieran tratamiento quirúrgico.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Laceración de la región axilar por rozamiento debido a uso excesivo o inadecuado. Alergia a algunos de los componentes del producto.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Velour con respaldo, interior acolchado de algodón.

Incluye dos varillas de contención posteriores.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

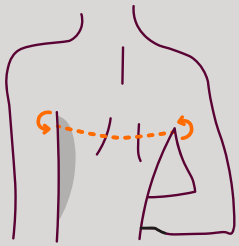

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tórax.

UNISEX

TALLE	TÓRAX	PESO
Único	60/120 cm	hasta 100 kg

INSTRUCCIONES DE USO



1. Cerrar el abrojo a la altura del tórax.



2. Colocarse ambas tiras encima de los hombros y cruzarlas en cruz por la espalda.



3. Ajustar el cierre a la altura de las costillas.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

