



# D.E.M.A.

## Faja regulable

CODIGO DE PRODUCTO: F030

### FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Contener y posturar la musculatura de tronco a nivel lumbar y dorsal bajo.

### USOS GENERALES

Lumbalgias, distensiones de la musculatura lumbar, esguinces, contención de los músculos de la pared anterolateral, post quirúrgicos, post parto, hernias, eventraciones abdominales y contusiones. Se recomienda su uso por encima de una prenda de algodón.

### INDICACIONES

Patologías traumatológicas, distensiones de la musculatura lumbar, esguinces leves. Contención de los músculos de la pared anterolateral de tronco, post quirúrgicos de abdomen o post parto. Sujeción de hernias y eventraciones abdominales no complejas. Si lo desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Debilidad severa de los músculos de la cincha abdominal, patologías de resolución quirúrgica.



### PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad. Reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 6% - Algodón 37%  
Acrílico 47% - Goma 10%.

Tela tejida en Cashmilon y elastómero.

Posee doble cierre de contención abdominal registrado.

Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

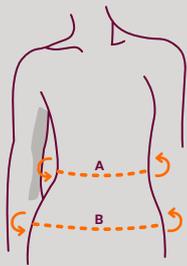

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura.

**UNISEX**

Altura 24 / 28 / 33 cm

TALLE	CINTURA (A)	CADERA (B)
1	52/75 cm	hasta 30 cm
2	57/80 cm	hasta 35 cm
3	70/100 cm	hasta 38 cm
4	80/135 cm	hasta 45 cm
5	90/145 cm	hasta 52 cm
6	105/170 cm	hasta 58 cm


## INSTRUCCIONES DE USO



**1.** Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.



**2.** Cerrar el abrojo en el medio del abdomen.

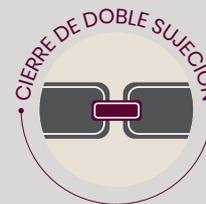

**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

 **D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

**anmat**  
Administración Nacional de Medicamentos,  
Aparatos y Tecnología Médica

