



## Faja tubular sin cierre

CÓDIGO DE PRODUCTO: F032 ALTURAS 24 / 28 / 33 CMS



### FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Contener y posturar la musculatura de tronco a nivel lumbar y dorsal bajo.

### USOS GENERALES

Lumbalgias, distensiones de la musculatura lumbar, esguinces leves, contención de los músculos de la pared anterolateral, post quirúrgicos, post parto, hernias, eventraciones abdominales. Se recomienda su uso por encima de una prenda de algodón.

### INDICACIONES

Patologías traumatológicas como lumbalgias secundarias a traumatismos, distensiones de la musculatura lumbar, esguinces leves. Contención de los músculos de la pared anterolateral de tronco, post quirúrgicos de abdomen o post parto. Sujeción de hernias o eventraciones abdominales no complejas. Si lo desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Debilidad severa de los músculos de la cincha abdominal, patologías de resolución quirúrgica.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

### PRECAUCIONES

Debilidad de los músculos de tronco por uso prolongado.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Acrílico 47% - Algodón 37% - Goma 10% - Poliéster 6% Tela tejida en Cashmilon y elastómero.

Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

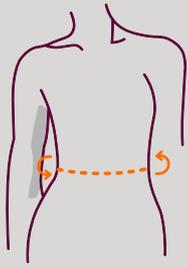

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura.

### UNISEX

Altura 24 / 28 / 33 cm

### TALLE

### CINTURA

1	53 cm hasta 75 cm
2	62 cm hasta 90 cm
3	70 cm hasta 110 cm
4	80 cm hasta 125 cm
5	90 cm hasta 140 cm
6	105 cm hasta 160 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



**1.** Colocar la faja desde el extremo superior o inferior del cuerpo.

**2.** Deslizar hasta la zona lumbar.



**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

 **D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**  
Asociación Nacional de Maestros en  
Aparatos y Tecnología Médica

