



D.E.M.A.

Faja resistente

CÓDIGO DE PRODUCTO: F034 ALTURAS 20CM O 28CM

FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Contener y posturar la musculatura de tronco a nivel lumbar y dorsal bajo con la posibilidad de regulación de ajuste según la necesidad.

USOS GENERALES

Lumbalgias, distensiones de la musculatura lumbar, esguinces leves, contención de los músculos de pared anterolateral, post quirúrgicos, post parto, hernias, eventraciones abdominales, contracturas, dolores crónicos, artrosis, distensiones y eventraciones.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas, lumbalgias secundarias a traumatismos, distensiones de la musculatura lumbar, esguinces leves. Contención de los músculos de la pared anterolateral de tronco, post quirúrgicos de abdomen y post parto. Sujeción de hernias o eventraciones abdominales no complejas. Si desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Debilidad severa de los músculos de la cincha abdominal, patologías de resolución quirúrgica.

PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 65% - Goma 35%.

Posee doble cierre de contención abdominal registrado.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

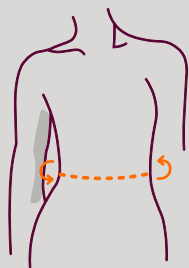

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura.

UNISEX

Altura 20 / 28 cm

TALLE

CINTURA

1	55 cm hasta 65 cm
2	65 cm hasta 80 cm
3	75 cm hasta 90 cm
4	90 cm hasta 110 cm
5	105 cm hasta 125 cm
6	115 cm hasta 145 cm


INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.



2. Cerrar el abrojo en el medio del abdomen.

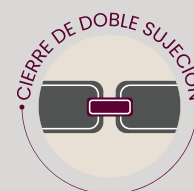

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contamos tu experiencia:**



+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

