



D.E.M.A.

Faja de trabajo

CÓDIGO DE PRODUCTO: F035

FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Contener, posturar y limitar parcialmente la movilidad de la columna lumbosacra, especialmente los movimientos de flexo extensión.

USOS GENERALES

Hernias discales, anterolistesis, retrolistesis, distensiones ligamentarias, esguinces, lumbalgias y contracturas. Recomendada para actividades cotidianas colocándose por encima de una prenda de algodón.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas secundarias o sobre del area lumborsacra: hernias discales, anterolistesis o retrolistesis de los cuerpos vertebrales, distensiones ligamentarias, esguinces, traumatismos, lumbalgias mecánicas secundarias a trabajos que impliquen el levantamiento de pesos o mantenimiento de posturas en flexión anterior de tronco por tiempo prolongado. Si desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica inmediata, debilidad extrema de los músculos de la cincha abdominal y paravertebrales lumbares.

PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 51% - Goma 49%. Aireada.

Incluye cuatro ballenas de contención.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

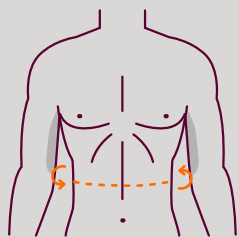

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura.

UNISEX

Altura 26 cm

TALLE

CINTURA

0	70 cm hasta 80 cm
1	80 cm hasta 95 cm
2	90 cm hasta 105 cm
3	100 cm hasta 115 cm
4	105 cm hasta 120 cm
5	110 cm hasta 130 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.




2. Posicionar las ballenas centradas en la espalda.



3. Cerrar el abrojo en el abdomen.



4. Ajustar los bretiles con los reguladores.

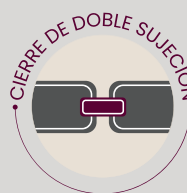

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

