



# D.E.M.A.

## Faja ballenada liviana

CÓDIGO DE PRODUCTO: F036 ALTURAS 24CM O 28CM

### FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Limitar parcialmente los movimientos de flexión y extensión del raquis dorsolumbar, contribuye a mejorar la postura de la columna.

### USOS GENERALES

Lumbalgias, hernias discales leves, anterolistesis, retrolistesis de grado leve, distensiones musculares y ligamentarias, post operatorios. Se recomienda su uso por encima de una prenda de algodón.

### INDICACIONES

Patologías traumatológicas, lumbalgias, hernias discales, antero y retrolistesis de grado leve, contracturas, post operatorios, distensiones musculares y ligamentarias de la zona lumbar. Si desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o en las que se deba favorecer el fortalecimiento de los músculos de la pared abdominal.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

### PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Algodón 37% - Acrílico 47% - Goma 10%  
- Poliéster 6%.

Incluye cuatro varillas de contención.

Posee doble cierre de contención abdominal registrado.

Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



## MEDIDAS

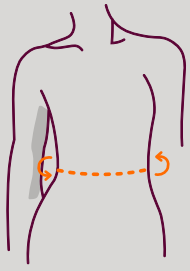

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de tu cintura.

**UNISEX**

Altura 24 / 28 cm

TALLE



CINTURA

1	54 cm hasta 64 cm
2	64 cm hasta 80 cm
3	76 cm hasta 100 cm
4	90 cm hasta 116 cm
5	100 cm hasta 130 cm
6	110 cm hasta 145 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja alrededor de la cintura.
2. Posicionar las ballenas centradas en la espalda.
3. Sujetar los abrojos en el abdomen.

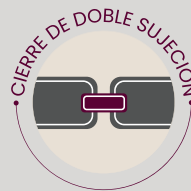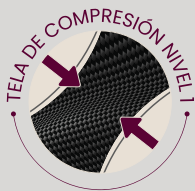


**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

 **D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**  
Administración Nacional de Medicamentos,  
Aparatos y Tecnología Médica

