



Faja de contención lumbar

CÓDIGO DE PRODUCTO: F037 INCLUSIÓN DE UNA BALLENA
F038 INCLUSIÓN DE CINCO BALLENAS

FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Limitar parcialmente los movimientos de flexión y extensión del raquis dorsolumbar, contribuye a mejorar la postura de la columna.

USOS GENERALES

Lumbalgias, hernias discales, anterolistesis, retrolistesis de grado leve, esguinces, post operatorio, distensiones musculares y ligamentarias.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas, lumbalgias secundarias a traumatismos o a movimientos repetitivos de la zona lumbar, hernias discales, antero y retrolistesis de grado leve, post parto, post operatorio, distensiones musculares y ligamentarias de la zona lumbar. Si desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o que precisen mayor contención de la zona afectada.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 52% - Goma 29% - Nylon 19%.
Confeccionada en tela afelpada interior.

Posee una sobrecinta de sujeción abdominal.

Incluye 1 o 5 ballenas de contención.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

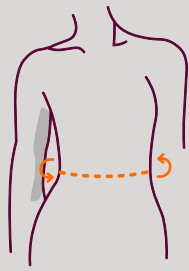

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura.

UNISEX

Altura 24 cm

TALLE

CINTURA


1
2
3
4
5

60 cm hasta 80 cm
80 cm hasta 100 cm
100 cm hasta 120 cm
115 cm hasta 140 cm
115 cm hasta 150 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.
2. Posicionar las ballenas centradas en la espalda.
3. Sujetar el cierre de abrojo en el abdomen.
4. Ajustar el cinto para ceñir la prenda al cuerpo.

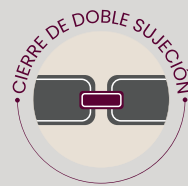


D.E.M.A. Respalda tus movimientos

 **D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

