



## Faja lumbar con ballenas por 24 cm

CODIGO DE PRODUCTO: F039 - 24

### FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Limitar parcialmente los movimientos de flexión y extensión del raquis dorsolumbar. Ayuda a mejorar la postura de la columna.

### USOS GENERALES

Lumbalgias, hernias discales, anterolistesis, retrolistesis de grado leve, distensiones musculares y ligamentarias. Recuperación de post operatorios, post parto o cirugías, malestares posturales, de cintura, fracturas, artrosis, contusiones, contracturas, desgarros, esguinces, dolores crónicos y lesiones musculares. Corrector postural. Recomendado para uso deportivo y en actividades cotidianas por encima de una prenda de algodón.

### INDICACIONES

Patologías traumatológicas o soporte a movimientos repetitivos de la zona lumbar, hernias discales, antero y retrolistesis de grado moderado, distensiones musculares y ligamentarias de la zona lumbar. Si lo desea, consulte a su médico.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



### CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o que precisen mayor contención de la zona afectada.

### PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 52% - Goma 29% - Nylon 19%  
Confeccionada con tela interior afelpada.  
Incluye cuatro varillas de contención.  
Posee una sobrebanda de sujeción abdominal.  
Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

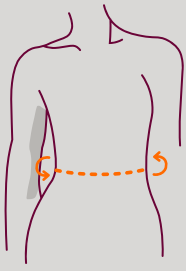

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de tu cintura.

**UNISEX**

Altura 24 cm

TALLE	CINTURA
1	60 cm hasta 75 cm
2	72 cm hasta 85 cm
3	85 cm hasta 105 cm
4	100 cm hasta 120 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



**1.** Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.




**2.** Posicionar las varillas centradas en la espalda.



**3.** Cerrar el abrojo en el medio del abdomen.



**4.** Ajustar el cinto para ceñir la prenda al cuerpo.

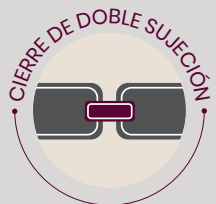

**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618