



D.E.M.A.

Faja lumbar reforzada por 28 cm

CODIGO DE PRODUCTO: F039 - 28

FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Limitar parcialmente los movimientos de flexión y extensión del raquis dorsolumbar, contribuye a mejorar la postura de la columna.

USOS GENERALES

Lumbalgias, hernias discales, anterolistesis, retrolistesis de grado leve, distensiones musculares y ligamentarias. Recuperación de post operatorios o cirugías, malestares posturales, de cintura, fracturas, artrosis, contusiones, contracturas, desgarros, esguinces, dolores crónicos y lesiones musculares. Corrector postural. Recomendada para el uso en actividades cotidianas por encima de una prenda de algodón.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas o soporte a movimientos repetitivos de la zona lumbar, hernias discales, antero y retrolistesis de grado moderado, distensiones musculares y ligamentarias de la zona lumbar. Si lo desea, consulte a su médico.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o que precisen mayor contención de la zona afectada.

PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 65% - goma 35%.

Incluye cinco varillas de contención maleables según la necesidad de uso.

Posee una sobrecorrea de sujeción abdominal.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

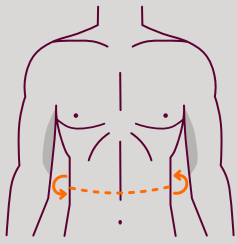

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura.

UNISEX

Altura 28 cm

TALLE

CINTURA

0	60 cm hasta 70 cm
1	70 cm hasta 90 cm
2	80 cm hasta 100 cm
3	90 cm hasta 120 cm
4	100 cm hasta 130 cm
5	110 cm hasta 140 cm
6	120 cm hasta 155 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.




2. Centrar las varillas en la espalda y malear según su necesidad



3. Cerrar el abrojo en el medio del abdomen.



4. Ajustar el cinto para ceñir la prenda al cuerpo.

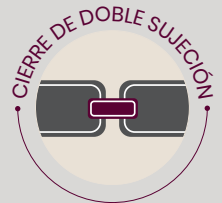

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

