



Faja torácica femenina

CÓDIGO DE PRODUCTO: F041-F

FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Contener y limitar parcialmente la movilidad de la parrilla costal.

USOS GENERALES

Fisuras costales, lesiones de los músculos intercostales, dorsalgias, distensiones musculares, artrosis y post operatorios.

INDICACIONES

Patologías como fisuras costales, lesiones de los músculos intercostales, dorsalgias y distensiones musculares a nivel torácico. Si desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Lesiones en la piel en los que deba evitarse el contacto con los materiales del producto.

PRECAUCIONES

Maceración de la piel por sudoración excesiva. Dificultades de la expansión de la caja torácica durante los movimientos de inspiración.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 65% - Goma 35%.

Confeccionada con tela afelpada en su interior.

Posee doble cierre de contención abdominal registrado.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

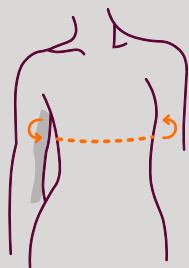

Para conocer tu talla, medí la circunferencia a la altura de toráx.

Altura frente 16 cm - dorso 24 cm

TALLE

TÓRAX

1

65 cm hasta 85 cm

2

80 cm hasta 100 cm

3

88 cm hasta 120 cm

4

97 cm hasta 135 cm


INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja alrededor del tórax.



2. Cerrar el abrojo en el medio del pecho, bajo busto.

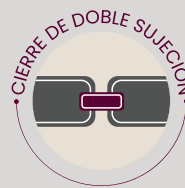

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**



+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

