



D.E.M.A.

IN MOTION

Faja lumbar de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: F042 ALTURA 24 O 28 CM

FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Contener y posturar la musculatura de tronco a nivel dorsolumbar, proveyendo calor terapéutico a la musculatura de esa región.

USOS GENERALES

Lumbalgias, distensiones de la musculatura lumbar, esguinces leves, contención de los músculos de la pared anterolateral, post quirúrgicos, hernias, eventraciones abdominales, artrosis, contusiones. Contribuye a tratamientos de reducción de peso. Alivia malestares posturales y contracturas. Brinda calor térmico terapéutico, antiinflamatorio. Se recomienda su uso por encima de una prenda de algodón.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas, lumbalgias, distensiones, contracturas y esguinces. Contención de los músculos de la pared anterolateral de tronco, post quirúrgicos de abdomen o post parto. Hernias discales o eventraciones abdominales no complicadas. Si desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías de resolución quirúrgica.

PRECAUCIONES

Debilidad de los músculos del tronco por uso excesivo e inactividad. Maceración de la piel por sudoración excesiva.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Posee doble cierre de contención abdominal registrado.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

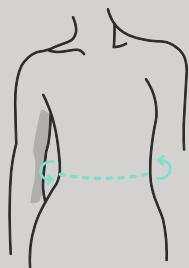

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de cintura.

UNISEX

Altura 24 cm / 28 cm

TALLE

TORÁX

1	65 cm hasta 85 cm
2	75 cm hasta 100 cm
3	85 cm hasta 110 cm
4	95 cm hasta 120 cm
5	105 cm hasta 140 cm
6	115 cm hasta 150 cm



INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja en la zona lumbar.



2. Prender el abrojo en el abdomen.

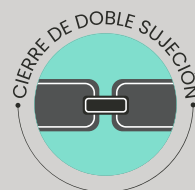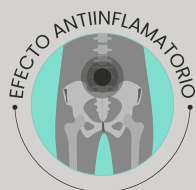

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
IN MOTION



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

