



D.E.M.A.

Faja lumbar ballenada de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: F043 ALTURA 24CM

FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Limitar parcialmente los movimientos de flexión y extensión del raquis dorsolumbar, mejorar la postura de la columna.

USOS GENERALES

Lumbalgias, distensiones de la musculatura lumbar, esguinces, contención de los músculos de pared anterolateral, post quirúrgicos, hernias, eventraciones abdominales, artrosis, contusiones, retrolistesis de grado leve. Contribuye a tratamientos de reducción de peso. Alivia malestares posturales y contracturas. Brinda calor térmico terapéutico, antiinflamatorio. Se recomienda su uso por encima de una prenda de algodón.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas, lumbalgias, distensiones, contracturas y esguinces. Contención de los músculos de la pared anterolateral de tronco, post quirúrgicos de abdomen o post parto. Hernias discales o eventraciones abdominales no complicadas. Si desea, consulte a su médico.

PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o que precisen mayor contención de la zona afectada.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Incluye 4 varillas de contención.

Posee doble cierre de contención abdominal registrado.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

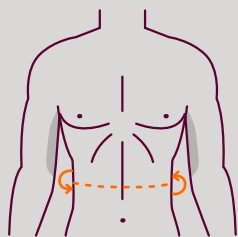

Para conocer tu talla, medí la circunferencia a la altura de cintura.

UNISEX

Altura 24 cm

TALLE

TORÁX

1	62 cm hasta 70 cm
2	72 cm hasta 90 cm
3	82 cm hasta 100 cm
4	92 cm hasta 120 cm
5	102 cm hasta 140 cm
6	112 cm hasta 150 cm

INSTRUCCIONES DE USO





1. Ubicar la faja en la zona lumbar.



2. Prender el abrojo en el abdomen.



3. Posicionar las ballenas centradas en la región baja de la espalda.

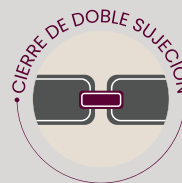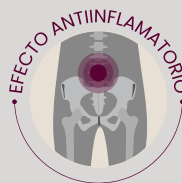

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

