



D.E.M.A.

Faja lumbar ballenada reforzada de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: F044

FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Limitar parcialmente los movimientos de flexión y extensión del raquis dorsolumbar, contribuye a mejorar la postura de la columna.

USOS GENERALES

Lumbalgias, hernias discales leves, anterolistesis, retrolistesis, distensiones musculares y ligamentarias.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas, lumbalgias o lesiones por movimientos repetitivos de la zona lumbar, hernias discales, antero, retrolistesis de grado leve, distensiones musculares y ligamentarias de la zona lumbar. Si desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o que precisen mayor contención de la zona afectada.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milimetro de espesor.

Incluye cuatro varillas de contención y una sobrebanda de sujeción abdominal.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

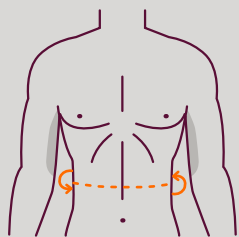

Para conocer tu talla, medí la circunferencia a la altura de cintura.

UNISEX

Altura 24 cm

TALLE



TORÁX

1	62 cm hasta 70 cm
2	72 cm hasta 90 cm
3	82 cm hasta 100 cm
4	92 cm hasta 120 cm
5	102 cm hasta 140 cm
6	112 cm hasta 150 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja alrededor de la cintura.
2. Centrar las ballenas en la espalda.
3. Prender el abrojo en el abdomen.
4. Ajustar la sobre-banda para ceñir la prenda al cuerpo.

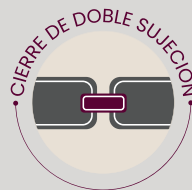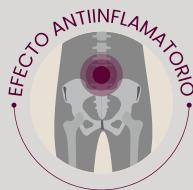

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:



+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asesoración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

