



Faja lumbar tipo corset

CODIGO DE PRODUCTO: F428 ALTURA 28CM / F433 ALTURA 33CM

FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Limitar parcialmente los movimientos de flexión y extensión del raquis dorsolumbar, contribuye a mejorar la postura de la columna.

USOS GENERALES

Lumbalgias, hernias discales, anterolistesis, retrolistesis de grado leve, distensiones musculares y ligamentarias. Recuperación de post operatorios o cirugías, malestares posturales, de cintura, fracturas, artrosis, contusiones, contracturas, desgarros, esguinces, dolores crónicos y lesiones musculares. Corrector postural. Recomendada para el uso en actividades cotidianas por encima de una prenda de algodón.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas o soporte a movimientos repetitivos de la zona lumbar, hernias discales, antero y retrolistesis de grado moderado, distensiones musculares y ligamentarias de la zona lumbar. Si lo desea, consulte a su médico.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o que precisen mayor contención de la zona afectada.

PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 70% - goma 30% combinada con gabardina 100% algodón.

Incluye cuatro varillas de contención maleables según la necesidad de uso.

Posee una sobrecintura de sujeción abdominal.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

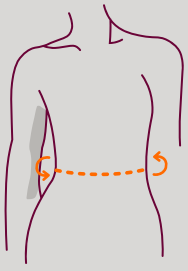

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura.

UNISEX


Altura 28 / 33 cm

TALLE	CINTURA
1	78 cm hasta 95 cm
2	86 cm hasta 105 cm
3	96 cm hasta 120 cm
4	105 cm hasta 140 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.

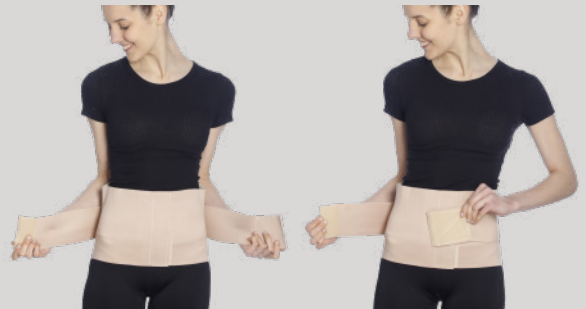


2. Sujetar el cierre en abrojo en el medio del abdomen.



3. Posicionar las cuatro varillas centradas en la espalda.



4. Ajustar el cinto para ceñir la prenda al cuerpo.

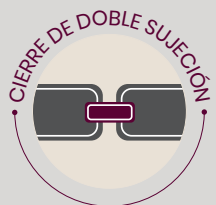

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

