



Férula para rizartrosis de pulgar neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: FERP

FINALIDAD

Alinear, posturar y limitar la articulación metacarpofalángica de pulgar.

USOS GENERALES

Artritis, rizartrosis de pulgar, hemiplejias (con aducción excesiva de pulgar), lesiones articulares y ligamentos.

INDICACIONES

Procesos articulares crónicos como artritis o rizartrosis de pulgar, patologías neurológicas que predisponen a la aducción excesiva de pulgar (pulgar incluido) como hemiplejias. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Dolor articular por ajuste excesivo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene 4 milímetros de espesor.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

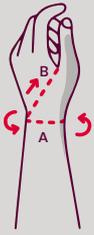

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu muñeca y desde la muñeca pasando entre el pulgar e índice hasta el otro lado de la muñeca.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	MUÑECA (A)	PULGAR (B)
0	11 cm	9/11 cm
1	14 cm	10/13 cm
2	16 cm	13/16 cm
3	18 cm	15/18 cm
4	21 cm	17/20 cm
5	24 cm	20/24 cm


INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la pulsera rodeando la muñeca y cerrar con el abrojo.

2. Pasar la tira alrededor del dedo pulgar cruzando los extremos.

3. Adherirlos en la palma externa.

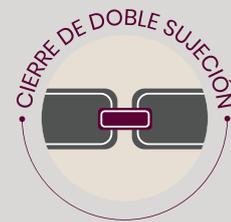

D.E.M.A. Respalda tus movimientos



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

