



D.E.M.A.

Faja de doble contención

CODIGO DE PRODUCTO: FEV

FINALIDAD

Contener las estructuras anatómicas viscerales del abdomen. Evitar la protrusión del contenido visceral a través de la pared abdominal.

USOS GENERALES

Herniaciones, eventraciones y/o evisceraciones de los órganos abdominales, defectos de la pared abdominal. Vientre caído, post operatorios, cirugías, post parto, post cesárea, contusiones, desgarros, lesiones, artrosis, contracturas, lumbalgias y malestares posturales. Se recomienda su uso por encima de una prenda de algodón.

INDICACIONES

Herniaciones, eventraciones y/o evisceraciones de los órganos abdominales a través de los defectos de la pared abdominal de carácter congénito o adquirido (secundario a cirugías). Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Hernias y eventraciones complicadas donde exista atrapamiento o atascamiento de vísceras por los orificios anormales de la pared abdominal. Patologías que requieran resolución quirúrgica.

PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 52% - Goma 29% - Nylon 19%.

Confeccionada con tela afelpada en su interior.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

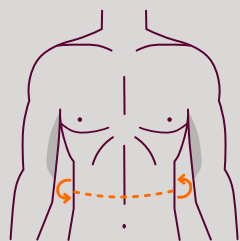

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de tu cintura.

UNISEX

Altura 28 cm - Sobrebanda de contención altura 16 cm

TALLE

CINTURA

1	65 cm hasta 95 cm
2	92 cm hasta 120 cm
3	110 cm hasta 135 cm
4	133 cm hasta 145 cm

INSTRUCCIONES DE USO




1. Ubicar la faja en el abdomen.



2. Cerrar el abrojo en la espalda a la altura del sacro.



3. Adherir la sobre-banda en la zona afectada para mayor compresión.

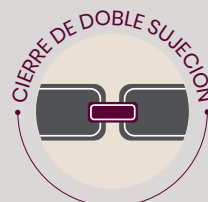

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

