



Férula inmovilizadora de dedos de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: FI

FINALIDAD

Inmovilizar y contener las articulaciones carpometacarpianas, metacarpofalángicas e interfalángicas de los dedos índice, mayor, anular y meñique según corresponda.

USOS GENERALES

Ideal para la recuperación de traumatismos, postoperatorios, lesiones, esguinces, torceduras, tendinitis o fracturas. Inmoviliza el dedo índice medio y anular.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas que requieran inmovilización articular total de los dedos de la mano como tendinitis, fracturas y esguinces severos. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Procesos que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Lesiones por ajuste excesivo. Hipotrofias musculares por uso prolongado. Limitación del rango articular por uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.
Incluye 2 varillas de contención.
Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

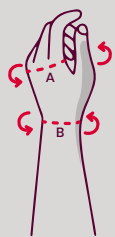

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos y muñeca.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 18 cm

TALLE	PALMA (A)	MUÑECA (B)
1	16/19 cm	15/22 cm
2	17/21 cm	16/24 cm
3	18/23 cm	17/26 cm
4	19/24 cm	18/28 cm

INSTRUCCIONES DE USO

- Introducir la mano en el interior de la prenda, el pulgar debe quedar libre en su posición anatómica.
- Cerrar el abrojo en la muñeca.
- Posicionar las varillas en la falange lesionada.
- Ajustar el abrojo inferior rodeando la muñeca y los superiores rodeando al dedo.
- De ser necesario, las varillas pueden curvarse.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

