



D.E.M.A.

Faja ostomizada

CÓDIGO DE PRODUCTO: FO / DIÁMETRO DE 7CM O 10CM



FINALIDAD

Contener las estructuras anatómicas musculares de la pared abdominal en pacientes que presenten ostomías.

USOS GENERALES

Ostomía de las vísceras abdominales como ileostomía o colostomía.

INDICACIONES

Patologías en las que se requiera contención de la musculatura abdominal y que presentan algún tipo de ostomía de las vísceras abdominales (ileostomía, colostomía). Si desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o en las que se deba favorecer el fortalecimiento de los músculos de la pared abdominal.

PRECAUCIONES

Debilidad de la musculatura abdominal secundaria por uso excesivo e inactividad. Alergia a alguno de los materiales del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 52% - Goma 29% - Nylon 19%.

Confeccionada con tela afelpada en su interior.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

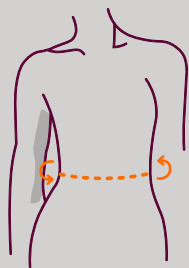

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura.

UNISEX

Altura 24 cm

Dímetro circular 7 a 10 cm

TALLE

1

2

3

4

CINTURA

60 cm hasta 85 cm

70 cm hasta 117 cm

87 cm hasta 132 cm

97 cm hasta 152 cm

INSTRUCCIONES DE USO



- 1.** Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.



- 2.** Verificar que el orificio se posicione sobre la colostomía.



- 3.** Cerrar el abrojo en el abdomen.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat

