

Gel de aplicación Frio o Calor

FLEXIBLE, ANATÓMICO, REUTILIZABLE Y LAVABLE.

El gel es práctico para la utilización de tratamientos desinflamatorios, traumatismos, tendinitis, esguinces, contracciones musculares, artrosis, desgarros y aquellos procedimientos que requieran la aplicación de frío o calor terapéutico.

INDICACIONES

FRÍO: colocar el gel en la heladera o congelador hasta lograr la temperatura deseada, 1 (una) o 2 (dos) horas de su aplicación.

CALOR: calentar agua, previo hervor apagar el fuego e introducir el gel por 5 minutos. Otra opción: en microondas por 10 segundos y de ser necesarios repetir el proceso.

Antes de aplicar **D.E.M.A. GEL** controlar si la temperatura es la deseada, de lo contrario aguardar unos minutos.

RECOMENDACIONES

- Envolver el gel en un paño o toalla antes de aplicar sobre la zona de necesidad.
- Evitar utilizar sobre la piel lastimada o irritada.
- No tóxico.
- Descartar el producto en caso de rotura o pinchadura.
- No ingerir.
- Mantener alejado del alcance de los niños.