



Hombrrera de Neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: H029

FINALIDAD

Estabilizar y posturar las estructuras anatómicas que forman parte de la articulación de hombro.

USOS GENERALES

Luxaciones, subluxaciones, hiperlaxitud articular, tendinitis, tendinosis, acv, hipertónicas, lesiones del plexo braquial y post operatorios. Uso deportivo y para actividades cotidianas. Se recomienda utilizar por encima de una prenda de algodón. Su material brinda calor térmico terapéutico con efecto antiinflamatorio.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas como luxaciones, subluxaciones, hiperlaxitud articular, tendinitis y tendinosis a nivel de la articulación de hombro, como otras neurológicas centrales y periféricas que determinen desalineaciones de dicha articulación por déficit muscular o hipertónica (acv, hipertónicas, lesiones de plexo braquial). Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Laceraciones o heridas quirúrgicas en proceso de sanación en la zona a tratar.

PRECAUCIONES

Reacciones dermatológicas por sudoración secundaria al uso de producto.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

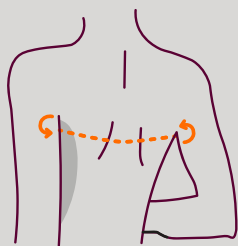

Para conocer tu talla,
medí la circunferencia
de tórax.

UNISEX

TALLE

CIRCUNFERENCIA DE TÓRAX

1	76 cm hasta 104 cm
2	88 cm hasta 120 cm
3	100 cm hasta 130 cm

INSTRUCCIONES DE USO




1. Posicionar el producto en el bíceps.



2. Cerrar el abrojo en el pecho.



3. Sujetar su abrojo en forma de U
en el brazo lesionado.

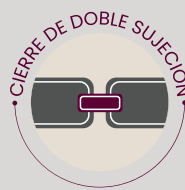

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si
necesitas saber cómo
usar correctamente tu
producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asesoración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

