



Inmovilizador de brazo

CÓDIGO DE PRODUCTO: IB

FINALIDAD

Inmovilizar parcialmente el rango articular de codo, especialmente la flexo extensión.

USOS GENERALES

Luxaciones, subluxaciones, tendinitis, entesitis, tenosinovitis, bursitis, postquirúrgicos alejados, hipertonia de los flexores de codo.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas y ortopédicas como luxaciones y subluxaciones de codo. Tendinitis, entesitis, tenosinovitis y bursitis. Patologías que requieran recuperación la extensión de codo con residuos flexos, como postquirúrgicos alejados, hipertonia de músculos flexores de codo. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica, situaciones que se precisen recuperar el rango de articulación de la flexión.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Déficit en la flexión de codo secundaria a uso prolongado, hipotrofias musculares de brazo y antebrazo.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Velour. Incluye varillas de aluminio.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

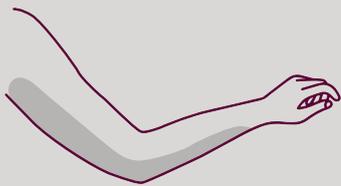

TALLE ÚNICO
UNISEX
IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	PESO
Único	hasta 100 kg

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir totalmente el producto separando las partes.
2. Colocar primero el brazalete, la muñequera y el protector de codo. Cerrar con sus abrojos.
3. Posicionar el brazo a 90°. Malear las varillas según la necesidad de uso y ubicarlas en la prenda.
4. Sujetar la tira superior del brazo y deslizarla desde la espalda hacia adelante.
5. Cerrar en la muñeca. Ajustar la altura con la regulación.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

**D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

