



D.E.M.A.

Inmovilizador de brazo infantil

CÓDIGO DE PRODUCTO: IBUI

FINALIDAD

Inmovilizar parcialmente el rango articular de codo, especialmente la flexo extensión.

USOS GENERALES

Luxaciones, subluxaciones, tendinitis, entesitis, tenosinovitis, bursitis, postquirúrgicos alejados, hipertonía de los flexores de codo.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas y ortopédicas como luxaciones y subluxaciones de codo. Tendinitis, entesitis, tenosinovitis y bursitis. Patologías que requieran recuperación la extensión de codo con residuos flexos, como postquirúrgicos alejados, hipertonía de músculos flexores de codos. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica, situaciones que se precisen recuperar rango de la articulación de flexión.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Déficit en la flexión de codo secundaria a uso prolongado, hipotrofias musculares de brazo y antebrazo.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Velour. Incluye tres varillas de contención.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

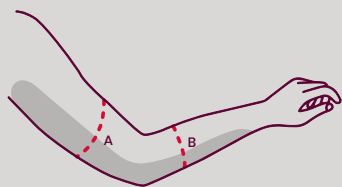

TALLE ÚNICO

UNISEX
IZQUIERDO Y DERECHO

Largo 25 cm

TALLE	BICEPS (A)	ANTEBRAZO (B)
Único	20/36 cm	16/32 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir el producto.
2. Separar las varillas laterales.
3. Posicionar el brazo y alinear el codo con la varilla posterior.
4. Ubicar las varillas en los laterales.
5. Ajustar los abrojos de sujeción.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

