



# Inmovilizador de dedo pulgar regulable

CÓDIGO DE PRODUCTO: IDPU

## FINALIDAD

Inmovilizar la totalidad de las articulaciones de dedo pulgar desde la carpometacarpiana hasta las interfalángicas distales.

## USOS GENERALES

Necesidades de reposo absoluto e inmovilización por inflamaciones o lesiones.

## INDICACIONES

Rizartrosis de pulgar, tendinitis de quervain, entorsis severas de pulgar, inflamaciones, distensiones y esguinces. Si lo desea, consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Patologías traumatológicas que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes de producto.

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



## PRECAUCIONES

Hipotrofia de la musculatura por uso prolongado, excesivo e inmóvil.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Velour.

Incluye una varilla de contención.

Contiene 1 unidad.



## CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

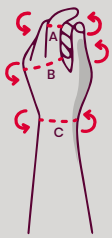

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de dedo, palma y muñeca.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	(A) DEDO	(B) PALMA	(C) MUÑECA
Único	4/10 cm	16/30 cm	16/34 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Posicionar la varilla sobre el dedo lesionado. La contención puede curvarse según la necesidad.



2. Ajustar primero la cinta rodeando la muñeca y cerrar el abrojo.



3. Prender la segunda tira rodeando la palma de la mano.



4. Cerrar la tercera en el dedo para inmovilizarlo.




***D.E.M.A. Respalda tus movimientos***

 **D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**  
Administración Nacional de Medicamentos,  
Alimentos y Tecnología Médica

