



D.E.M.A.

Inmovilizador de pierna tripanel

CÓDIGO DE PRODUCTO: INMPC 45CM – INMPM 55CM – INMPL 65CM

FINALIDAD

Inmovilizar la totalidad de los movimientos de la articulación de la rodilla.

USOS GENERALES

Esguinces, traumatismos, post quirúrgicos, distensiones ligamentosas, patologías meniscales, desgarros, acv, hemiplejias, ecne, paraplejias, lesión medular. Recuperación y rehabilitación de lesiones que requieran inmovilización en la pierna.

INDICACIONES

Patologías en las que se requiera limitar los movimientos articulares de la rodilla; esguinces, traumatismos, post quirúrgicos, distensiones ligamentarias, patologías meniscales y desgarros. Patologías neurológicas en las que se necesite mantener o recuperar la extensión de la rodilla: acv, hemiplejias, ecne, paraplejias, lesión medular. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Limitaciones del rango articular en flexión. Alergia a alguno de los componentes del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Debilidad de la musculatura de los miembros inferiores por uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Algodón 65% – poliéster 35%.

Ajuste en abrojo

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

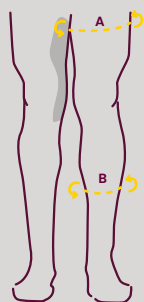

Para conocer tu talla, medir la circunferencia del muslo y el gemelo.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO


	MUSLO	GEMELO
INMPC	74 cm	56 cm
INMPM	80 cm	62 cm
INMPL	86 cm	62 cm

CIRCUNFERENCIA MAXIMA EXTENSIÓN

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la prenda en la pierna.
2. Posicionar las varillas: una en la parte posterior y una en cada lateral de la pierna. Malear según la necesidad de uso.
3. Cerrar los 6 abrojos.
4. Centrar el orificio en la rótula.

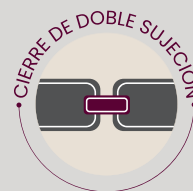

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:



+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

