



Inmovilizador de muñeca de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: IWN

FINALIDAD

Limita parcialmente los movimientos de flexo extensión como también desviación radial y cubital de la articulación de la muñeca.

USOS GENERALES

Artritis, tendinitis, esguinces, artrosis, postquirúrgicos. Brinda calor térmico con efecto analgésico. Alivia dolores y tensiones.

INDICACIONES

Patologías con procesos inflamatorios agudos o crónicos como artritis, tendinitis, esguinces, artrosis y postquirúrgicos de la articulación de la muñeca. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Procesos que requieran mayor inmovilización de la zona afectada o resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Lesiones por compresión excesiva, reacciones dermatológicas por sudoración en el caso de uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.
Incluye 5 ballenas de contención.
Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

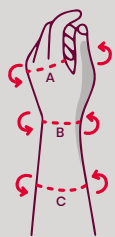

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos, muñeca y antebrazo.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO


	(A)	(B)	(C)
TALLE	PALMA	MUÑECA	ANTEBRAZO
1	14/18 cm	16/18 cm	16/22 cm
2	16/22 cm	18/22cm	20/24 cm
3	22/28 cm	20/26 cm	22/28 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir la prenda. Colocar desde la palma hasta el antebrazo.

2. Cerrar los lazos en abrojo. Pasar el ajuste superior entre el dedo pulgar y el índice.

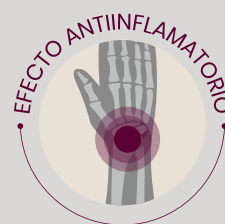

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contamos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

