



D.E.M.A.



Zapato jambier

CÓDIGO DE PRODUCTO: JB

FINALIDAD

Mejorar la descarga distal y marcha evitando la flexión dorsal del ante pie durante la fase de despegue.

USOS GENERALES

Post quirúrgicos del pie. Brinda mayor comodidad y seguridad en periodos de recuperación.

INDICACIONES

Pacientes postquirúrgicos de fracturas o alineaciones articulares del antepié. Lesiones plantares que requieran evitar carga distal (mal perforante plantar en pie diabético). Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías en las que se deba evitar descarga distal. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Dolores secundarios a marcha anómala.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Macramé. Suela de goma y varilla interna. Contrafuerte reforzado.

Cierre en abrojo delantero.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia del antepié, el largo de suela y número de calzado.


UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	ANTEPIE	LARGO SUELA	Nº CALZADO
0	30 cm	24 cm	34/35
1	31 cm	26 cm	36/37
2	32 cm	27 cm	38/39
3	33 cm	28 cm	40/42
4	38 cm	31 cm	43/45

INSTRUCCIONES DE USO



- 1. Abrir el producto.
- 2. Posicionar el pie.
- 3. Corroborar que el talón calce correctamente.
- 4. Cerrar los abrojos.

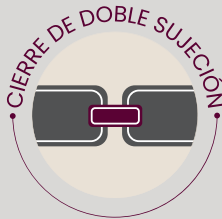

D.E.M.A. Respalda tus movimientos



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618