



Couk-up de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: KO

FINALIDAD

Posturar como así también contener en forma conjunta la articulación de la muñeca y de pulgar.

USOS GENERALES

Tendinitis, tendinosis, artritis, esguinces severos, hemiplejías. Indicada para abducir el pulgar. Recuperación de lesiones metacarpianas y carpianas. Rehabilitación.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas, ortopédicas y neurológicas con tendencia a la mano en puño con pulgar incluido como hemiplejías, acv. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Procesos que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Lesiones por compresión excesiva, reacciones dermatológicas por sudoración en el caso de uso prolongado y excesivo.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Incluye 2 varillas de contención inmovilizadoras.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

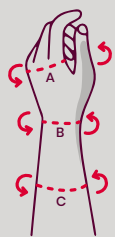

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos, muñeca y antebrazo.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

	(A)	(B)	(C)
TALLE	PALMA	MUÑECA	ANTEBRAZO
1	16/20 cm	14/18 cm	14/20 cm
2	18/24 cm	16/22 cm	20/28 cm
3	22/28 cm	20/26 cm	20/28 cm

INSTRUCCIONES DE USO




1. Acomodar el producto a la izquierda o derecha según la necesidad de recuperación. Abrir completamente la prenda y corroborar que la varilla curva este posicionada del lado de la palma.

2. Introducir el pulgar y posicionar la férula desde la palma hasta el antebrazo.



3. Cerrar los lazos alrededor de la muñeca.

4. Para abducir el dedo, tomar el lazo pequeño, rodear el pulgar cruzando los abrojos en cruz y prenderlos en el dorso de la mano.

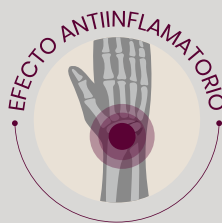

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

