



D.E.M.A.

Coup-up pediátrico de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: KOP

FINALIDAD

Posturar y contener en forma conjunta la articulación de la muñeca y de pulgar.

USOS GENERALES

Tendinitis, tendinosis, artritis, esguinces severos, hemiplejías. Indicada para abducir el pulgar. Recuperación de lesiones metacarpianas y carpianas. Rehabilitación.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas y ortopédicas como tendinitis, tendinosis, artritis, esguinces severos. Como también neurológicas con tendencia a la mano en puño con pulgar incluido como hemiplejías, acv. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Procesos que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Lesiones por compresión excesiva, reacciones dermatológicas por sudoración en el caso de uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene 4 milímetros de espesor.
Incluye dos varillas inmovilizadoras.
Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talle, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos.


UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	PALMA
CH	14 cm hasta 18 cm
M	16 cm hasta 20 cm
G	18 cm hasta 22 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir completamente la prenda.
2. Introducir el pulgar en el orificio.
3. Posicionar la férula curva desde la palma hasta la muñeca.
4. Cerrar los lazos rodeando la muñeca.
5. Prender los tres abrojos que abducen el pulgar.

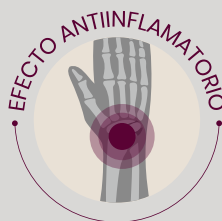

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

