



**D.E.M.A.**

**IN MOTION**

## Muñequera con cierre de abrojo

CÓDIGO DE PRODUCTO: M001

### FINALIDAD

Contener y estabilizar la articulación de la muñeca.

### USOS GENERALES

Esguinces leves, contención, alivio de tensiones y malestares. Uso deportivo y cotidiano.

### INDICACIONES

Patologías que presenten inestabilidad de muñeca: tendinitis, síndromes de debilidad muscular, hiperlaxitud ligamentaria. Si lo desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes del producto.

### PRECAUCIONES

Alteraciones circulatorias o de nervios periféricos por compresión excesiva o mal uso de la misma.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 65% - Goma 35%.

Elástico de compresión nivel III.

Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS



Para conocer tu talle, medí la circunferencia de tu muñeca.

**UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO**

Altura 8 cm

TALLE

MUÑECA

0

13 cm hasta 16 cm

1

15 cm hasta 20 cm

2

18 cm hasta 23 cm

3

19 cm hasta 26 cm

4

22 cm hasta 29 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Colocar rodeando la muñeca y cerrar el abrojo.



**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
**IN MOTION**



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat  
Asociación Nacional de Maquillistas,  
Alimentos y Tecnología Médica

