



D.E.M.A.

IN MOTION

Muñequera tubo de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: M003

FINALIDAD

Proteger, contener y estabilizar la articulación de la muñeca.

USOS GENERALES

Tendinitis, artrosis y distensiones ligamentarias. Recomendada para prevenir lesiones, inflamaciones, distensiones. Brinda calor térmico, antiinflamatorio. Alivia dolores y tensiones.

INDICACIONES

Patologías como tendinitis, artrosis y distensiones ligamentarias de muñeca. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Alteraciones circulatorias o de nervios periféricos por compresión excesiva o mal uso de la misma.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu muñeca.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE


MUÑECA

1	15 cm hasta 18 cm
2	17 cm hasta 21 cm
3	19 cm hasta 24 cm
4	21 cm hasta 28 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la mano por el interior de la prenda
2. Posicionar el producto en la muñeca.

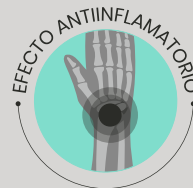

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
IN MOTION



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**



+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

