



IN MOTION

Muñequera regulable de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: M004

FINALIDAD

Estabilizar y contener la articulación de la muñeca con distintos grados de compresión.

USOS GENERALES

Artritis, tendinitis, esguinces. Contención en prácticas deportivas y uso cotidiano. Brinda calor térmico, analgesico. Alivia dolores y tensiones.

INDICACIONES

Patologías que presenten inestabilidad de la muñeca y cambios de circunferencia de la misma, como artritis, tendinitis o esguinces. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Dolor y lesiones en la piel por ajuste excesivo.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros.
Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu muñeca.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 18 cm

TALLE


MUÑECA

0	13 cm hasta 16 cm
1	15 cm hasta 20 cm
2	18 cm hasta 23 cm
3	19 cm hasta 26 cm
4	22 cm hasta 29 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir la prenda.
2. Posicionar el producto rodeando la muñeca.
3. Cerrar el abrojo.

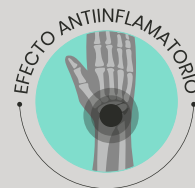

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
IN MOTION



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

