



# D.E.M.A.

## Muñequera boomerang de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: M007

### FINALIDAD

Estabilizar la articulación de la muñeca y del pulgar: carpometacarpiana, metacarpofalángica e interfalángica.

### USOS GENERALES

Recomendada para aliviar artritis, tendinitis de quervain, distensión ligamentaria, artrosis, esguinces leves, túnel carpiano, torceduras y rizartrosis del pulgar. Uso deportivo y para actividades cotidianas.

### INDICACIONES

Patologías que requieran limitación parcial de la movilidad de muñeca y pulgar. Si lo desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes de producto.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

### PRECAUCIONES

Debilidad e hipotrofia muscular por uso prolongado excesivo e inmóvil.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene 4 milímetros de espesor.  
Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



## MEDIDAS



Para conocer tu talle, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos.

**UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO**

Altura 8 cm

TALLE

PALMA

0

14 cm hasta 17 cm

1

17 cm hasta 21 cm

2

20 cm hasta 24 cm

3

23 cm hasta 27 cm

4

26 cm hasta 30 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



**1.** Ubicar el pulgar dentro del orificio de la prenda.



**2.** Sujetar el extremo más largo del producto y envolver alrededor de la muñeca.



**3.** Cerrar con el abrojo.



**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat  
Asociación Nacional de Medicamentos,  
Alimentos y Tecnología Médica

