



Muñequera boomerang con fleje de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: M009

FINALIDAD

Estabilizar y contener la articulación de la muñeca e inmovilizar parcialmente las articulaciones de pulgar.

USOS GENERALES

Distensiones ligamentarias o tendinosas, rizartrosis de pulgar, artritis, artrosis, sinovitis, recuperación de esguinces leves, túnel carpiano y torceduras. Brinda calor térmico, analgésico. Alivia dolores y tensiones musculares.

INDICACIONES

Patologías inflamatorias agudas o crónicas que comprometan la articulación de la muñeca y el pulgar, como distensiones ligamentarias, tendinosas, rizartrosis de pulgar, artritis, artrosis y sinovitis. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran movilizar la articulación del pulgar para su recuperación. Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Hipotrofia muscular por uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 mm de espesor.

Incluye una varilla inmovilizadora.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS



Para conocer tu talle, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 9 cm

TALLE

PALMA

0

14 cm hasta 17 cm

1

17 cm hasta 21 cm

2

20 cm hasta 24 cm

3

23 cm hasta 27 cm

4

26 cm hasta 30 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Colocar el pulgar dentro del orificio de la prenda.



2. Sujetar el extremo más largo y dar la vuelta alrededor de la muñeca.



3. Cerrar con el abrojo.



4. Ajustar el último abrojo en el extremo del pulgar.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

