



Muñequera mitón

CÓDIGO DE PRODUCTO: MT003

FINALIDAD

Limitar parcialmente la movilidad de la articulación de la muñeca.

USOS GENERALES

Contiene a las articulaciones, ligamentos o grupos musculares. Alivia dolores y tensiones. Inflamación de tendones, esguinces, usos deportivos, actividades diarias y prevención.

INDICACIONES

Tendinitis leves, entorsis de muñeca, artritis, artrosis, síndrome de túnel carpiano leve, inflamaciones y recuperación de lesiones. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que precisen aumentar los rangos articulares de la muñeca y que requieran movilidad libre articular de muñeca para su recuperación. Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Dolor y lesiones en la piel por ajuste excesivo.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Elástico de compresión nivel III.

Poliéster 65% - goma 35%.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

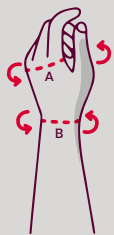

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de tu muñeca y palma a la altura de los nudillos.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 17 cm

TALLE	PALMA (A)	MUÑECA (B)
1	17/20 cm	15/18 cm
2	18.5/23 cm	17/20 cm
3	20/26 cm	19/22 cm
4	22/28 cm	21/24 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la mano por el interior de la prenda.



2. El pulgar debe quedar libre en su posición anatómica.



3. Cerrar el abrojo en la muñeca.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

