



# Muñequera mitón neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: MT003N

## FINALIDAD

Limitar parcialmente la movilidad de la articulación de la muñeca.

## USOS GENERALES

Inflamación de tendones, esguinces, usos deportivos, actividades diarias y prevención. Contiene a las articulaciones, ligamentos o grupos musculares. Brinda calor térmico con efecto analgésico. Alivia dolores y tensiones.

## INDICACIONES

Tendinitis leves, entorsis de muñeca, artritis, artrosis, síndrome de túnel carpiano leve. Si lo desea, consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Patologías que precisen aumentar los rangos articulares de la muñeca y las que requieran movilidad articular de muñeca para su recuperación. Alergia a alguno de los componentes de producto.

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



## PRECAUCIONES

Hipotrofia de la musculatura por uso prolongado, excesivo e inmóvil.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene 4 milímetros.

Contiene 1 unidad.



## CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

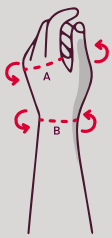

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura.

**UNISEX**

Altura 28 cm

TALLE	PALMA (A)	MUÑECA (B)
1	16/20 cm	15/20 cm
2	18/22 cm	16/22 cm
3	20/24 cm	17/24 cm
4	22/26 cm	18/26 cm

## INSTRUCCIONES DE USO




**1.** Introducir la mano por el interior de la prenda.



**2.** El pulgar debe quedar libre en su posición anatómica.



**3.** Cerrar el abrojo en la muñeca.

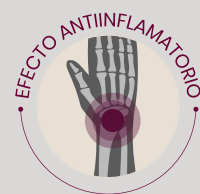


**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

 **D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**  
Administración Nacional de Medicamentos,  
Aparatos y Tecnología Médica

