

D.E.M.A.

IN MOTION

Rodillera de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: R059 CORTA - R061 LARGA - R091 CORTA CON RÓTULA ABIERTA

FINALIDAD

Contener y proteger los movimientos de flexo-extensión de la articulación de la rodilla.

USOS GENERALES

Hiperlaxitud ligamentaria, inestabilidad articular, esguinces leves, subluxaciones. Contención a los músculos, articulaciones y ligamentos de la rodilla. Recuperación de post operatorios, post artroscopia, fracturas, bursitis, tendinitis, lesiones, artrosis, esguinces, distensiones y desgarros. El diseño con orificio estabiliza la rótula. Brindar calor térmico terapéutico, con efecto analgésico antiinflamatorio. Para uso deportivo y actividades cotidianas.

INDICACIONES

Inestabilidades leves de la articulación de la rodilla e hiperlaxitud ligamentaria. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran mayor nivel de contención e inmovilización de la articulación de la rodilla alergia a alguno de los componentes del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Ajuste excesivo por talle inadecuado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.
R059 Altura 20cm - R061 altura 28cm
Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

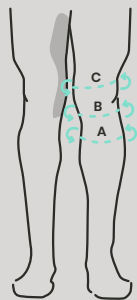

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la parte superior, medio e inferior de la rodilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 20 cm - Altura 28 cm

	(A) INFERIOR	(B) MEDIO	(C) SUPERIOR
TALLE			
1	30/34 cm	30/32 cm	36/40 cm
2	32/36 cm	32/36 cm	40/46 cm
3	36/40 cm	36/40 cm	42/48 cm
4	39/44 cm	40/44 cm	44/50 cm
5	42/46 cm	42/46 cm	48/54 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la prenda desde el pie. Si el modelo incluye rótula abierta, evitar estirar el centro.



2. Deslizar hasta posicionarla en la rodilla.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
IN MOTION



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

