



**D.E.M.A.**

**IN MOTION**

## Rodillera rótula libre de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: R063 CON AJUSTE EN ABROJO – R062 SIN AJUSTE.

### FINALIDAD

Contener y proteger los movimientos de flexo-extensión de la articulación de la rodilla.

### USOS GENERALES

Hiperlaxitud ligamentaria, inestabilidad articular, esguinces leves, subluxaciones. Contención a los músculos, articulaciones y ligamentos de la rodilla. Recuperación de post operatorios, post artroscopia, fracturas, bursitis, tendinitis, lesiones, artrosis, esguinces, distensiones y desgarros. El diseño con orificio estabiliza la rótula. Brindar calor térmico terapéutico, con efecto analgésico antiinflamatorio. Para uso deportivo y actividades cotidianas.

### INDICACIONES

Inestabilidades leves de la articulación de la rodilla e hiperlaxitud ligamentaria. Si lo desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran mayor nivel de contención e inmovilización de la articulación de la rodilla. Alergia a alguno de los componentes del producto.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

### PRECAUCIONES

Ajuste excesivo por inadecuado talle.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene 4 milímetros de espesor.

Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

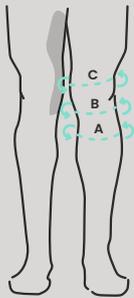

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la parte superior, media e inferior de la rodilla.

**UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO**

Altura 28 cm.

TALLE	(A) INFERIOR	(B) MEDIO	(C) SUPERIOR
1	30/34 cm	30/32 cm	36/40 cm
2	32/36 cm	32/36 cm	40/46 cm
3	36/40 cm	36/40 cm	42/48 cm
4	39/44 cm	40/44 cm	44/50 cm
5	42/46 cm	42/46 cm	48/54 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir completamente el producto. Introducir la prenda desde el pie. Evitar estirar el centro.
2. Ubicarla en la rodilla. Centrar el orificio en la rótula.
3. Si el diseño incluye sujeción, ajustar los lazos en abrojo.



**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
**IN MOTION**



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat  
Asociación Nacional de Maquilleros,  
Alimentos y Tecnología Médica

