



Rodillera con soporte en U de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: R064 / R065 CON DOBLE AJUSTE

FINALIDAD

Contener, proteger y limitar parcialmente la movilidad de la rótula, del tendón rotuliano y los movimientos de flexión, extensión y lateralización de la articulación de la rodilla.

USOS GENERALES

Inestabilidades leves de la articulación de la rodilla e hiperlaxitud ligamentaria. Subluxación o luxación rotuliana por alteraciones anatómicas o desbalances musculares.

INDICACIONES

Hiperlaxitud ligamentaria, inestabilidad articular, esguinces leves, subluxaciones. Contención a los músculos, articulaciones y ligamentos de la rodilla. Recuperación de post operatorios, post artroscopia, fracturas, bursitis, tendinitis, lesiones, artrosis, esguinces, distensiones y desgarros. El diseño con orificio y soporte estabiliza la rótula. Brindar calor térmico terapéutico, con efecto analgésico antiinflamatorio. Para uso deportivo y actividades cotidianas. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran mayor nivel de contención e inmovilización de la articulación de rodilla. Alergia a alguno de los componentes del producto.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor. Incluye un soporte acolchado.

Doble ajuste en abrojo.

Contiene 1 unidad.

PRECAUCIONES

Ajuste excesivo por inadecuado talle.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

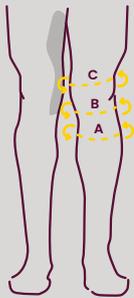

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de la parte superior, media e inferior de la rodilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 28 cm

TALLE	(A) INFERIOR	(B) MEDIO	(C) MUSLO
1	30/34 cm	30/32 cm	36/40 cm
2	32/36 cm	32/36 cm	40/46 cm
3	36/40 cm	36/40 cm	42/48 cm
4	39/44 cm	40/44 cm	44/50 cm
5	42/46 cm	42/46 cm	48/54 cm


INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir completamente el producto. Introducir la prenda desde el pie. Evitar estirar el centro.

2. Ubicarla en la rodilla. Centrar el orificio en la rótula.

3. Si el diseño incluye sujeción, ajustar los lazos en abrojo.

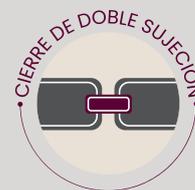

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Maestrías
Aparatos y Tecnología Médica

